

Panel de referencia para la prueba rápida de antígeno de virus Rota/Adeno

Controles de calidad internos para el virus Adeno y el virus Rota, utilizados en conjunto con el kit de prueba.

USO PREVISTO

Estos materiales de control se utilizan para monitorear la precisión analítica del kit de prueba y la exactitud de todo el proceso de análisis. Están destinados únicamente para control de calidad en diagnóstico in vitro y no deben ser utilizados para calibración ni como estándar asignado.

PRINCIPIO


Los materiales de referencia se preparan a partir de cultivos liofilizados de patógenos respiratorios. Son aplicables para el control de calidad y la evaluación de reactivos para la detección de antígenos de enfermedades del tracto respiratorio, así como de reactivos para la detección de antígenos de patógenos respiratorios multiplex (con objetivos de detección que cubren Adenovirus y Rotavirus).

COMPONENTES

Tipo de referencia	Número de referencia	Especificación
Referencia positiva	P1	1
Referencia negativa	P2	1

INSTRUCCIONES DE USO

1. Sumerja completamente la cabeza del hisopo de la muestra recolectada en la solución tampón dentro del tubo.
2. Gire el hisopo a lo largo de la pared interna del tubo aproximadamente 6 veces o apriete el tubo 6 veces para eluir la muestra, asegurándose de que la muestra en el hisopo se lave completamente en la solución tampón.
3. Apriete la cabeza del hisopo contra la pared interna del tubo para retener la mayor cantidad de líquido posible en el tubo.
4. Deseche el hisopo y cubra la punta del gotero, luego mezcle bien el líquido.
5. Agregue 80 μ L (3 gotas) de la muestra procesada en el pocillo de muestra y comience el temporizador.
6. Espere 15 minutos y lea los resultados. Nunca lea los resultados después de 20 minutos.

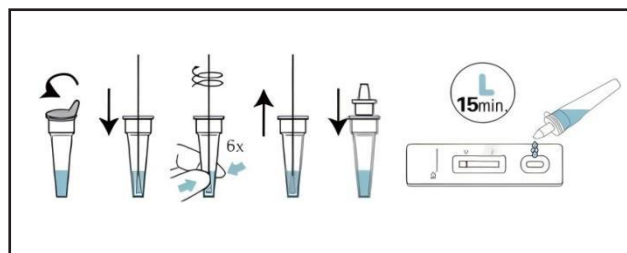

Reach Diagnostic (Wuhan) Biotech Co., Ltd

🏢 Piso 1, Edificio C18, No.388, Calle Gaoxin 2, Acelerador Internacional de Empresas Biomédicas Guang Gu, Fase 3, Zona de Desarrollo de Alta Tecnología del Lago del Este, Wuhan, China

🌐 Web: www.reachdiagnostic.com.cn

✉ Correo electrónico: sales@reachdiagnostic.cn